

## SUPER-TRAC

Ascensor inclinado de plataforma para sillas de ruedas



El Super-Trac de Garaventa es un ascensor inclinado de plataforma portátil, patentado y único en el mundo. Provee accesibilidad instantánea y económica cuando las escaleras son una barrera. El diseño único de su plataforma permite que sea apto para todo tipo de sillas de ruedas, incluyendo motorizadas, infantiles, deportivas y las convencionales para adultos. El Super-Trac es ideal para edificios públicos y residenciales.

El Super-Trac sube y baja escaleras gracias a sus dos motores a batería, los cuales accionan dos orugas de goma reforzada con acero. El Super-Trac puede subir hasta 30 pisos con una sola carga de su batería. Su plataforma de gran tamaño es adecuada para casi todas las sillas de ruedas. Su operación es fácil, gracias a sus controles sencillos y bien identificados. Para asegurar la protección del pasajero, incorpora aditamentos de seguridad como un cinturón con bloqueador eléctrico y un freno estacionario.

### Apoyacabeza

Ajustable, para la comodidad del pasajero.

### Panel de control

Los sencillos controles incluyen un indicador de carga y un interruptor de llave, el cual evita el uso no autorizado.



### Cinturón de seguridad

Dotado de un bloqueador eléctrico, el cual no permite el uso del Super-Trac a menos que el cinturón esté abrochado.

### Ruedas auxiliares

Permiten un fácil desplazamiento sobre superficies planas, ya sea entre escaleras o en los recintos de origen y destino.

### Baterías

Para total portabilidad, el Super-Trac usa una batería recargable de 24 V. Se incluye un cargador automático.

### Retenes de sujeción

Cuatro retenes ajustables sujetan firmemente la silla de ruedas a la plataforma.

### Plataforma

Plataforma de gran tamaño, apta para virtualmente todas las sillas de ruedas, incluyendo las motorizadas y las deportivas.

### Orugas

La goma reforzada con acero asegura resistencia y durabilidad. El diseño exclusivo de las orugas proporciona un agarre firme a cualquier escalera, sin importar su construcción o diseño.

### Rampa de acceso

El Super-Trac incorpora una rampa con superficie antiresbalante, para facilitar el acceso.

### Freno estacionario

Se provee un freno eléctrico para inmovilizar la plataforma al entrar y salir de ella.

### Plataforma hidráulica

Un poderoso pistón hidráulico ajusta la posición de la plataforma al subir y bajar escaleras.



El Super-Trac de Garaventa puede resolver de inmediato sus problemas de accesibilidad. No requiere de remodelaciones costosas ni de permisos de instalación. Su costo es mucho menor que el de un ascensor inclinado fijo o un ascensor vertical. Al ser portátil, no afecta permanentemente el acceso al edificio ni el ancho de las escaleras. El Super-Trac puede ser trasladado fácilmente de una escalera a otra, o a otro edificio, según cambien sus requerimientos de accesibilidad.



El Super-Trac es fácil de usar. Como se muestra en esta secuencia, un operador puede transportar fácilmente una pesada silla motorizada y su pasajero. La foto arriba muestra al pasajero sobre la plataforma, a la cual llegó a través de la rampa incorporada. La silla es sujeta mediante los retenes ajustables y un cinturón con bloqueador eléctrico proporciona seguridad adicional al pasajero.

Aún con carga, el Super-Trac puede desplazarse fácilmente sobre superficies planas, tales como los descansos de las escaleras, gracias a sus ruedas auxiliares. Estas ruedas facilitan también su almacenamiento. En esta foto, el Super-Trac usó sus ruedas para llegar hasta la escalera. El operador inclina entonces la plataforma mediante el control hidráulico e inicia el ascenso.

El Super-Trac sube escaleras de hasta 35 grados de inclinación. El pasajero mantiene una cómoda posición horizontal al subir y bajar escaleras. Los dos motores eléctricos del Super-Trac permiten subir hasta 30 pisos con una sola carga. Sus anchas orugas proporcionan una excelente estabilidad. El operador simplemente usa los controles del Super-Trac, y no necesita hacer grandes esfuerzos físicos.

## CARACTERÍSTICAS

- La plataforma de gran tamaño permite su uso con virtualmente cualquier silla de ruedas, incluyendo las motorizadas y las deportivas
- Rampa de acceso antideslizante integrada
- Dos poderosos motores que permiten hasta 200 kgs (440 libras) de carga
- Baterías recargables
- Funciona en escaleras interiores y exteriores
- Anchas orugas dobles, para un agarre firme a las escaleras
- Ruedas de gran tamaño, para su fácil movilidad en los descansos de las escaleras
- Retenes y cinturón de seguridad integrados, para máxima sujeción a la plataforma
- Apoyacabeza ajustable
- Controles sencillos y fáciles de usar
- Diseño sólido para uso colectivo

## BENEFICIOS

- Solución instantánea a sus problemas de accesibilidad
- Más económico que los ascensores verticales o inclinados hechos a la medida
- No requiere remodelaciones ni licencias o permisos de instalación
- No hay efectos permanentes en el ancho de las escaleras
- Un único equipo puede ser usado en varios edificios
- Es fácil de guardar en un lugar seguro cuando no está en uso
- Requiere poco mantenimiento, en comparación con los ascensores fijos, verticales o inclinados
- Es una solución de respaldo en caso de fallas eléctricas

# SUPER-TRAC - Elevador inclinado de plataforma para sillas

Otros productos Garaventa:



## Garaventa Stair-Trac

Diseñado para el transporte de sillas manuales convencionales. El Stair-Trac es muy compacto y fácil de usar y su diseño es similar al del Super-Trac. Provee una manera económica de trasladar por escaleras a una persona en silla de ruedas.

## Super-Trac DVD

El DVD explica con detalles como operar el equipo, contactar el distribuidor mas cercana o visita nuestra página de Internet.

Importante información de productos de Garaventa Lift está disponible en nuestra página de Internet:  
[www.garaventa.ca](http://www.garaventa.ca)

## Red de Distribuidores

El red de distribuidores de Garaventa son disponible de ayudar con demostraciones, entrenamiento, y servicio pos venta.

## Garaventa Lift

PO Box 1769,  
Blaine, WA 98231-1769  
7505 134A Street, Surrey, BC  
Canada V3W 7B3

Teléfono: +1 604 594-0422  
Llamada Gratuita: 1-800-663-6556  
Fax: +1 604 594-9915

Email: [productinfo@garaventa.ca](mailto:productinfo@garaventa.ca)

Portal de internet: [www.garaventa.ca](http://www.garaventa.ca)  
Portal de internet del Grupo Garaventa:  
[www.garaventalift.com](http://www.garaventalift.com)

©2009 Garaventa Lift. Estamos continuamente mejorando nuestros productos, especificaciones delineadas en éste catálogo están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Printed in Canada  
21175-A-PB


¿Necesita Ayuda?

Llame a su representante o distribuidor Garaventa de su lugar o llame gratuitamente a nuestro número "Design Hotline" 1-800-663-6556




El Super-Trac de Garaventa puede usarse también en exteriores. Ofrece una solución de accesibilidad portátil a edificios públicos y residenciales.

## Dimensiones del descanso de la escalera (min.)

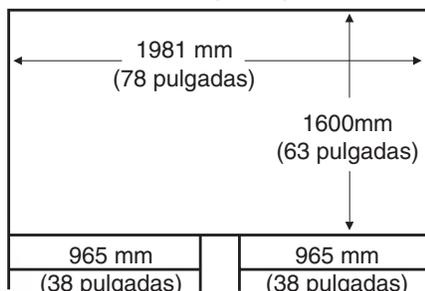


## Dimensiones del equipo

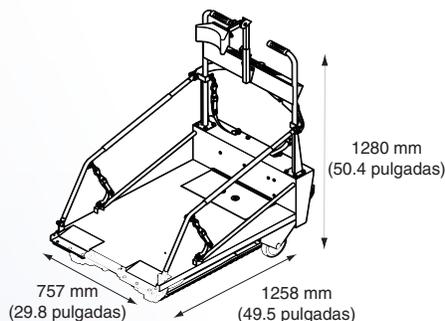

## Especificaciones

Capacidad ..... 200kgs / 440 libras  
Ángulo de escaleras (max.) .... 35°  
Potencia ..... Baterías selladas de 24 V  
Recarga ..... Automática 115/230 VAC  
Freno ..... Electromagnético de seguridad  
Peso ..... 115kgs/253 libras  
Velocidad de ascenso ..... 6.5m (21.4 pies) / min  
Velocidad de descenso ..... 10.6m (34.7 pies) / min

## Espacio para la silla de ruedas

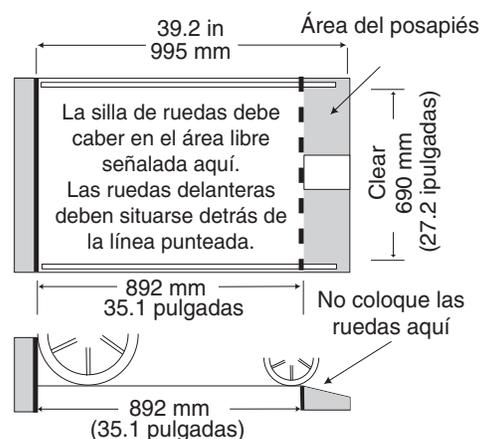

[www.garaventa.ca](http://www.garaventa.ca)

Representante Autorizado Garaventa

